



LT BGNAUDOJIMO INSTRUKCIJA. SKAITMENINIO KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO LD2


pav.1 PAGRINDINĖS DALYS IR KOMPONENTAI

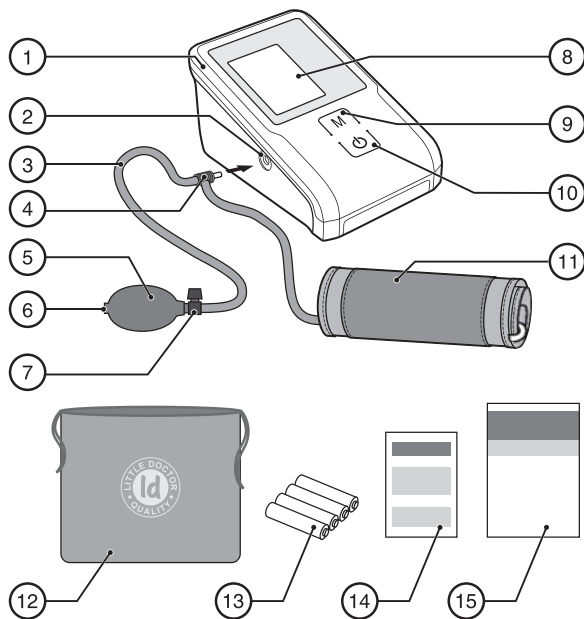


pav.2 MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS

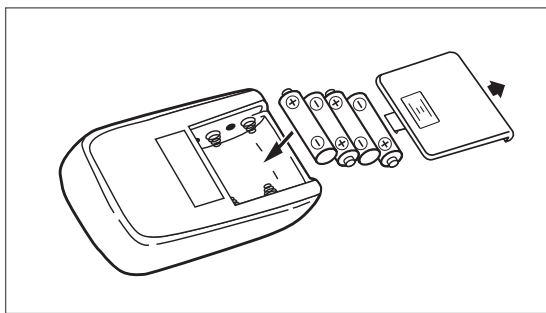


pav.3 TAISYKLINGA MATAVIMO POZA

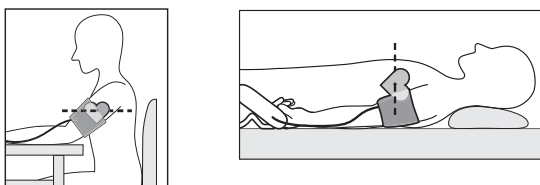

pav.4 RANKOVĖS UŽDĖJIMAS

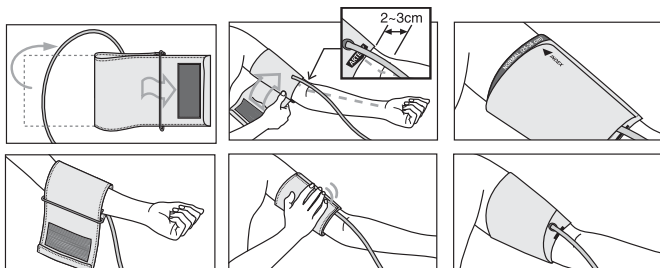

pav.5 MATAVIMO PROCEDŪRA

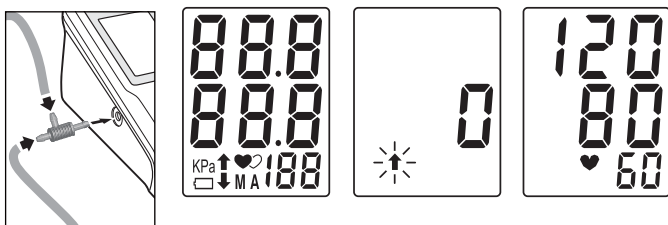

DALIŲ IR KOMPLEKTUOJANČIŲ DETALIŲ PAVADINIMAS (pav. 1)

- ① ELEKTRONINIS BLOKAS.
- ② SLĖGTUVO IR MANŽETĖS PRIJUNGIMO LIZDAS.
- ③ ORO TIEKIMO VAMZDELIS.
- ④ TRIŠAKIS PRIJUNGTI SLĖGTUVAJ IR MANŽETĘ PRIE ELEKTRONINIO BLOKO.
- ⑤ SLĖGTUVAS.
- ⑥ SLĖGTUVO ATBULINIS VOŽTUVAS.
- ⑦ SLĖGIO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS.

- ⑧ Skystųjų kristalų ekranas.
- ⑨ MYGTUKAS M (ATMINTIS).
- ⑩ MYGTUKAS (MAITINIMO JUNGIMAS/ISJUNGIMAS).
- ⑪ MANŽETĖ.
- ⑫ DĖKLAS.
- ⑬ MAITINIMO ELEMENTAI.
- ⑭ GARANTINIS TALONAS.
- ⑮ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.

Ši instrukcija skirta suteikti naudotojui pagalbą saugiai ir efektyviai eksploatuojant LD2 modifikacijos skaitmeninį LD kraujospūdžio ir pulso dažnį prietaisą matuojant oscilometrinio metodu su Fuzzy Algorithm. Manžetė apvyniojama aplink žastą, pripūčiama slėgtuvo pagalba. Jutiklinis prietaiso elementas nustato silpnus slėgio manžetėje svyravimus, kurie susidaro dėl žastinės arterijos išsiplėtimo ir susitraukimo, kaip atsakas į širdies plakimą. Slėgio bangų amplitudė matuojama, konvertuojama į gyvsidabrio stulpelio milimetrus ir rodoma ekrane, kaip skaitmeninė reikšmė. Kraujospūdžio rezultatų saugojimui prietaiso atmintyje yra 90 ląstelių. Prašome atkreipti dėmesį, kad prietaiso matavimai gali būti ne tokie tikslūs, kaip nurodyta, jei prietaisas naudojamas arba laikomas kitose, nei šios instrukcijos skyriuje "Techninės charakteristikos" nurodytose temperatūros ir drėgnumo sąlygose. Perspėjame, kad matuojant šiuo prietaisu arterinį kraujospūdį asmenims su išreikšta aritmija galimos klaidos. Pasikonsultuokite su Jūsų gydytoju dėl arterinio kraujospūdžio matavimo vaikai.

DARBO PRINCIPAS

Arterinį kraujospūdį ir pulso dažnį prietaisas matuoja oscilometrinio metodu su Fuzzy Algorithm. Manžetė apvyniojama aplink žastą, pripūčiama slėgtuvo pagalba. Jutiklinis prietaiso elementas nustato silpnus slėgio manžetėje svyravimus, kurie susidaro dėl žastinės arterijos išsiplėtimo ir susitraukimo, kaip atsakas į širdies plakimą. Slėgio bangų amplitudė matuojama, konvertuojama į gyvsidabrio stulpelio milimetrus ir rodoma ekrane, kaip skaitmeninė reikšmė. Kraujospūdžio rezultatų saugojimui prietaiso atmintyje yra 90 ląstelių. Prašome atkreipti dėmesį, kad prietaiso matavimai gali būti ne tokie tikslūs, kaip nurodyta, jei prietaisas naudojamas arba laikomas kitose, nei šios instrukcijos skyriuje "Techninės charakteristikos" nurodytose temperatūros ir drėgnumo sąlygose. Perspėjame, kad matuojant šiuo prietaisu arterinį kraujospūdį asmenims su išreikšta aritmija galimos klaidos. Pasikonsultuokite su Jūsų gydytoju dėl arterinio kraujospūdžio matavimo vaikai.

TAISYKLINGO KRAUJOSPŪDŽIO MATAVIMO REKOMENDACIJOS

1. Norėdami taisykliai pamatuoti kraujospūdį, JŪS TURITE ŽINOTI, KAD ARTERINIS KRAUJOSPŪDIS GALI SMARKIAI PAKISTI NET PER TRUMPĄ LAIKĄ. Arterinio kraujospūdžio lygis priklauso nuo daugelio faktorių. Įprastai, vasara kraujospūdis yra mažesnis, o žiemą didesnis. Arterinis kraujospūdis kinta kartu su atmosferos slėgiu, priklauso nuo fizinio krūvio, emocinio jautrumo, streso ir mitybos režimo. Didelę įtaką daro vartojami vaistiniai preparatai, alkoholiniai gėrimai ir rūkymas. Daugeliui žmonių net pati kraujospūdžio matavimo procedūra poliklinikoje sukelia jo padidėjimą. Todėl namų sąlygose pamatuotas arterinis kraujospūdis dažnai skiriasi nuo pamatuoto poliklinikoje. Kadangi arterinis kraujospūdis žemose temperatūrose didėja, matuokite jį kambario temperatūroje (apytiksliai esant 20 °C). Jei prietaisas buvo laikomas esant šaltai temperatūrai, prieš naudodami palaikykite jį bet 1 valandą kambario temperatūroje, priešingu atveju kraujospūdžio rezultatas gali būti klaidingas. Paros bėgyje sveikų žmonių sistolinio (viršutinio) kraujospūdžio matavimų skirtumas gali sudaryti 30-50 mm (Hg), o diastolinio (apatinio) - iki 10 mm (Hg). Arterinio kraujospūdžio priklausomybė nuo įvairių faktorių kiekvienam žmogui yra individuali. Todėl rekomenduojama rašyti specialų arterinio kraujospūdžio rodmenų dienoraštį. TIK DIPLOMUOTAS GYDYTOJAS DIENORAŠČIO DUOMENŲ PAGRINDU GALI IŠANALIZUOTI JŪSŲ ARTERINIO KRAUJOSPŪDŽIO KITIMO TENDENCIJĄ.
2. Jei Jūs sergate širdies ir kraujagyslių ligomis, taip pat kitomis ligomis, kurių gydymui reikalingas arterinio kraujospūdžio monitoringas, matuokite kraujospūdį Jūsų šeimos gydytojo nustatytu metu. ATMINKITE, KAD DIAGNOZUOTI IR GYDYTI HIPERTONIJĄ GALI TIK DIPLOMUOTAS GYDYTOJAS PATIES ATLIKTI ARTERINIO KRAUJOSPŪDŽIO MATAVIMŲ PAGRINDU. KEISTI PASKIRTŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ DOZĘ ARBA VARTOTI VAISTINIUS PREPARATUS GALIMA TIK PASKYRUS ŠEIMOS GYDYTOJUI.
3. Asmenims su tokiais sutrikimais, kaip gliui kraujagyslių sklerozė, silpna pulso banga, taip pat pacientams su išreikštu širdies susitraukimo dažnio sutrikimu, taisykliai pamatuoti arterinį kraujospūdį gali būti sudėtinga. TOKIAIS ATVEJAIS BŪTINA DIPLOMUOTO GYDYTOJO KONSULTACIJA DĖL ELEKTRONINIO PRIETAISO NAUDOJIMO.
4. NORĖDAMI GAUTI TAISYKLINGUS RODMENIS MATUODAMI JŪSŲ ARTERINĮ KRAUJOSPŪDĮ ELEKTRONINIU PRIETAISU, MATAVIMO METU BŪTINA LAIKYTI TYLOS. Matuoti arterinį kraujospūdį reikia ramioje pataligoje aplinkoje kambario temperatūroje. Valandą iki kraujospūdžio matavimo būtina nevalgyti, 1,5-2 valandas - nerūkyti, nevartoti tonizuojančių gėrimų ir alkoholio.
5. Arterinio kraujospūdžio rodmenų tikslumas priklauso ir nuo to, ar manžetė atitinka Jūsų rankos dydį. MANŽETĖ NEGALI BŪTI PER MAŽA, ARBA, ATVIKŠČIAI, PER DIDELĖ.
6. Pakartotinus matavimus atlikite 3 minučių intervalu, kad atstotų kraujo cirkuliaciją. Tačiau, dėl reikšmingo kraujagyslių elastingumo praradimo žmonėms su išreikšta ateroskleroze laiko tarpas tarp matavimų turi būti didesnis (10-15 minučių). Tai taip pat taikoma ilgai cukriniu diabetu sergantiems žmonėms. Norėdami tiksliau pamatuoti arterinį kraujospūdį, rekomenduojama matuoti jį serijomis po 3 kartus ir apskaičiuoti vidutinę matavimo rodmenų reikšmę.

MAITINIMO ELEMENTŲ ĮDĖJIMAS (pav. 2)

1. Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir įdėkite 4 AA tipo maitinimo elementus pagal skyriaus viduje pateiktą schemą. Įsitikinkite, kad maitinimo elementai tinkamai įdėti pagal poliškumą. Nenaudokite pernelyg didelės jėgos atidarydami maitinimo elementų skyriaus dangtelį.
2. Uždarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.

Keiskite maitinimo elementus naujais, kai ekrane nuolat rodomas maitinimo elementų keitimo simbolis " ", arba, kai ekrane nėra jokių simbolių. Maitinimo elementų keitimo indikatorius nerodo elementų išsekimo lygio. Rekomenduojama naudoti šarminius maitinimo elementus. Maitinimo elementų pakanka apytiksliai 1000 matavimų su sąlyga, kad yra laikomasi prietaiso naudojimo taisyklių.

Kartu su prietaisu parduodami maitinimo elementai yra skirti patikrinti prietaiso veikimą pardavimo metu, jų tarnavimo laikas gali būti trumpesnis už rekomenduojamą maitinimo elementų tarnavimo laiką.

Keiskite visus maitinimo elementus kartu. Nenaudokite naudotų maitinimo elementų.

Jei ilgą laiką nenaudojate prietaiso - išimkite iš jo maitinimo elementus.

Nepalikite išseiktų maitinimo elementų prietaiso viduje.

TAISYKLINGA PADĖTIS MATUOJANT KRAUJOSPŪDĮ (pav. 3)

1. Atsisėskite prie stalo, kad arterinio kraujospūdžio matavimo metu Jūsų ranka atsiremtų į jo paviršių. Įsitikinkite, kad manžetės padėtis ant žasto yra apytiksliai širdies lygyje, kad dilbis ant stalo yra atsipalaidavęs ir nejuda.
2. Jūs galite matuoti kraujospūdį ir gulėdami ant nugaros. Žiūrėkite į lubas, būkite ramūs ir nejudėkite matavimo metu. Būtinai įsitikinkite, kad kraujospūdžio matavimo vieta ant žasto yra apytiksliai širdies lygyje.

MANŽETĖS PARUOŠIMAS (pav. 4)

1. Iverkite apytiksliai 5 cm manžetės krašto į metalinį žiedą, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Uždėkite manžetę ant kairės rankos, vamzdelis turi būti nukreiptas į delno pusę. Jei matuoti kraujospūdį ant kairės rankos yra sudėtinga, galima matuoti ir ant dešinės rankos. Šiuo atveju svarbu atsiminti, kad rodmenys gali skirtis 5-10 mm (Hg).
3. Apvyniokite manžetę aplink rankos, kad apatinis manžetės kraštas būtų 2-3 cm atstumu nuo alkūnės linkio. Žymuo su užrašu "ARTERY" turi būti virš rankos arterijos.
4. Uždėkite manžetę, kad ji tampaipri glugstų prie rankos, tačiau nevertų jos. Dėl pernelyg veržiančiai, arba atvirkščiai, dėl pernelyg laisvai uždėtos manžetės matavimo rodmenys gali būti netikslūs.
5. Kai manžetė yra užsegta, žymuo "INDEX" turi nurodyti į sritį "NORMAL (25-36 cm)". Tai reiškia, kad manžetė uždėta taisykliai ir atitinka žasto apimtį. Jei žymuo nurodo į " " pažymėtą sritį, reiškia, kad manžetė yra per maža ir rodmenys bus didesnis. Jei žymuo nurodo į " " pažymėtą sritį, reiškia, kad manžetė yra per didelė ir rodmenys bus mažesnis.
6. Jei ranka yra kūginės formos, rekomenduojama uždėti manžetę pagal spiralę, kaip parodyta paveikslėlyje.
7. Jei Jūs atraitosite drabužių rankovę ir tuo suversite ranką, kliudydami kraujotaką, prietaiso rodmenys gali neatitikti Jūsų arterinį kraujospūdį.

MATAVIMAS (pav. 5)

1. Prijunkite manžetės ir slėgtuvo oro žarnes prie trišakio. Įkiškite trišakį į prietaiso korpuse esantį lizdą (1 pav.). Prieš matuodami kraujospūdį 3-5 kartus giliai įkvėpkite - iškvėpkite ir atsipalaiduokite. Nejudėkite, nekalkėkite ir neįtemptkite rankos kraujospūdžio matavimo metu.

2. Paspauskite mygtuką 0/l.
3. Ekrane trumpai pasirodys visi simboliai (2 pav.), suskambės du trumpi pyptelėjimai. Po pyptelėjimo ekrane bus rodomas "0" ir pradės mirksėti simbolis "❖". Tai reiškia, kad prietaisas paruoštas matuoti kraujospūdį (3 pav.).
4. Spausdami slėgtuvą pripūskite oro į manžetę iki slėgio, 30 – 40 mm (Hg) didesnio už Jūsų numatomą sistolinį (viršutinį) kraujospūdį. Slėgio manžetėje reikšmė nuolat rodoma ekrane. Jei numatomo sistolinio (viršutinio) kraujospūdžio reikšmės plius 30–40 mm (Hg) suma mažesnė arba lygi 190 mm (Hg), patogumo sumetimais Jūs galite pūsti orą į manžetę iki pyptelėjimo (prietaiso garso signalas suveikia pasiekus manžetėje 190 mm (Hg) slėgį). JEI ŠI SUMA YRA DIDESNĖ, KAIP 190 MM (HG), TĘSKITE PŪSTI MANŽETĘ KI REIKIAMO SLĖGIO IR PO PYPTELĖJIMO, ŽIURĖDAMI RODMENIS EKRANE.
- NESUDARYKITE MANŽETĖJE DIDESNIO, KAIP 300 MM (HG) SLĖGIO, NES KITAIP JŲS VIRŠYSITE DIDŽIAUSIĄ ŠIO PRIETAISO MATAVIMO RIBĄ. PASIEKUS DIDESNĮ, KAIP 300 MM (HG), SLĖGĮ PRIETAISAS PYPTELĖJA SU PERTRUKIAIS.
5. Pasiekus reikiamą slėgį manžetėje nustokite spausti slėgtuvą ir atsargiai padėkite jį ant stalo.
6. Slėgis manžetėje automatiškai pradės mažėti, o ekrane bus rodomas simbolis "♥".
7. Jei oro išleidimo metu pasirodė simbolis "❖", reiškia, kad manžetė nebuvo pripūsta iki reikiamo lygio. 4 sekundžių bėgyje pripūskite manžetę 30–40 mm (Hg) daugiau už prieš tai buvusią reikšmę, priešingu atveju ekrane pasirodys pranešimas apie klaidą "Err".
8. Slėgis keičiasi tol, kol mirksis simbolis "♥". Pasistenkite nejudėti ir nejudinti rankos kraujospūdžio matavimo metu. JEI EKRANE PASIRODYS SIMBOLIS "Err", NUSTOKITE MATUOTI KRAUJOSPŪDĮ IR IŠLEISKITE IŠ MANŽETĖS VISĄ ORĄ PASPAUSDAMI ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVĄ. NUIMKITE MANŽETĘ IR LEISKITE RANKAI PAILSĖTI. PAKARTOKITE KRAUJOSPŪDŽIO MATAVIMĄ LAIKYDAMASI ŠIOS EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS.
9. Pasibaigus matuoti suskambės ilgas pyptelėjimas ir ekrane bus rodomi Jūsų kraujospūdžio ir pulso reikšmės (4 pav.). Mirksintis simbolis "♥" ekrane rodo nereguliarių pulso ritmą. Aritmijos simbolis ekrane gali atsirasti ir dėl kūno judėjimo kraujospūdžio matavimo metu. Jei simbolis "♥" rodomas periodiškai, kreipkitės į Jūsų šeimos gydytoją.
10. Išleiskite likusį orą iš manžetės oro išleidimo vožtuvo pagalba.
11. Vėl norėdami matuoti kraujospūdį tiesiog pradėkite iš naujo pūsti manžetę. NORĖDAMI GAUTI TIKSLŲ REZULTATĄ BŪTINAI PADARYKITE PERTRAUKĄ TARP MATAVIMŲ, KAD ATSTATYTI KRAUJO Cirkuliaciją. Todėl NEMATUOKITE KRAUJOSPŪDĮ ANTRĄ KARTĄ ANKŠČIAU, NEI PO 3 MINUČIŲ.
- Jei neišjungsite ir nenaudosite prietaiso ilgiau, kaip 3 minutes, jis išjungs automatiškai.
12. Paspauskite mygtuką 0/l.

ATMINTIES FUNKCIJA

1. Kiekvieno matavimo rezultatas (kraujospūdis ir pulsas) automatiškai įrašomas į prietaiso atmintį. MATAVIMO REZULTATAS NEIŠSISAUGO, JEI BUVO PARODYTAS PRANEŠIMAS APIE KLaidą.
2. Prietaiso atmintyje gali būti išsaugoma iki 90 matavimo rezultatų ir vidutinė 3-jų paskutinių matavimų reikšmė. Kai matavimo kiekis pasiekia 90 kartų, senesni duomenys bus automatiškai pakeisti naujais matavimais.
3. Jūs galite peržiūrėti prietaiso atminties turinį paspausdami mygtuką M. Pirmą kartą paspaudus mygtuką M ekrane bus rodoma vidutinė trijų paskutinių matavimų reikšmė, laikomą prietaiso atmintyje su indeksu "A". Antrą kartą paspaudus mygtuką.
- Mekrane trumpai bus rodomas indeksas "1" (atminties ląstelės numeris), po to bus rodomas paskutinio matavimo rezulta-
tas (5 pav.). Kiekvieną kitą kartą paspaudus mygtuką M, atminties ląstelės numerio indeksas didės vienu vienetu ir ekrane bus rodomas nurodytos atminties ląstelės turinys.

DUOMENŲ IŠ PRIETAISO ATMINTIES PAŠALINIMAS

Norėdami pašalinti iš prietaiso atminties visus išsaugotus matavimo rezultatus paspauskite mygtuką "M" ir laikykite ilgiau, kaip 5 sekundes. Ekrane bus rodomi simboliai "Clr", duomenys iš prietaiso atminties bus pašalinti.

PRANEŠIMAS APIE KLaidas

INDIKACIJA	GALIMA PRIEŽASTIS	ŠALINIMO BŪDAI
	Netinkamai uždėta manžetė arba nesandariai prijungtas oro vamzdelio trišakis. Kraujospūdis nebuvo pamatuotas dėl judesio ranka arba dėl kalbėjimo matavimo metu. Manžetė nebuvo pripūsta iki reikiamos reikšmės. Esant išreikštiems širdies susitraukimo dažnio sutrikimams, gyliai kraujagyslių sklerozei, silpnai pulso bangai, taisyklingai pamatuoti arterinį kraujospūdį gali būti sudėtinga.	Įsitikinkite, kad manžetė uždėta tinkamai, o trišakis įdėtas sandariai ir pakartokite visą procedūrą. Pakartokite matavimą laikydamasi visų šios naudojimo instrukcijos rekomendacijų. Pakartokite matavimą, pripūsdami manžetę 30–40 mm (Hg) daugiau numatomo sistolinio kraujospūdžio. Tokiais atvejais būtina diplomuoto gydytojo konsultacija dėl elektroninio prietaiso naudojimo.
	Išiekvoti maitinimo elementai	Pakeiskite visus maitinimo elementus į naujus

PRIEŽIŪRA, LAIKYMAS IR UTILIZAVIMAS

1. Šį prietaisą būtina saugoti nuo padidinto drėgnumo, tiesioginių saulės spindulių, smūgių, vibracijos. PRIETAISAS NĖRA ATSPARUS VANDENIUI!
2. Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso arti šildymo prietaisų ir atviros ugnies.
3. Jei ilgą laiką nenaudojate prietaiso, išimkite iš jo maitinimo elementus. Skysčio iš maitinimo elementų nutekėjimas gali sukelti prietaiso gedimą. LAIKYKITE MAITINIMO ELEMENTUS VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!
4. Neterškite prietaiso ir saugokite jį nuo dulkių. Prietaiso valymui galima naudoti sausą minkštą šluostę.
5. Saugokite prietaisą ir jo dalis nuo kontakto su vandeniu, skiedikliais, spiritu, benzinu.
6. Saugokite manžetę nuo aštrių daiktų, taip pat nebandykite ištraukti arba suvynioti manžetės.
7. Saugokite prietaisą nuo stiprių smūgių ir nemėtykite jo.
8. Prietaise nėra matavimų tikslumo nustatymo elementų. Draudžiama patiems ardyti elektroninį bloką. Esant būtinybei remontuokite prietaisą tik specializuotose servisuose.
9. Suėjus nustatytam tarnavimo laikui būtina periodiškai kreiptis į specialistus (specializuotus remonto servisus) ir patikrinti prietaiso techninę būklę.
10. Utilizuojant prietaisą vadovaukitės Jūsų regione šiuo metu galiojančiomis taisyklėmis. Gamintojas nenustato specialių šio prietaiso utilizavimo sąlygų.
11. Manžetė atspari daugkartiniams sanitariniams apdorojimams. Vidinę manžetės audinio padengimą pusę (kontaktuo-
jančią su paciento ranka) leidžiama apdoroti vatos tamponu, suvilgytu 3 % vandenilio peroksido tirpalu. Ilgai naudojant prietaisą manžetės audinio padengimas gali išblukti. Neleidžiama skalbti manžetės, taip pat lyginti karštu lygintuvu.

GEDIMŲ DIAGNOSTIKA

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	PAŠALINIMO BŪDAS
Paspaudus mygtuką 0/1 ekrane nerodomi simboliai	Išiekvoti maitinimo elementai. Netinkamai pagal poliškumą įdėti maitinimo elementai. Maitinimo elementų kontaktai yra užteršti.	Pakeiskite visus maitinimo elementus į naujus. Tinkamai įdėkite maitinimo elementus. Nušluostykite kontaktus sausa šluoste.
Kiekvieną kartą matuojant arterinis kraujospūdis yra skirtingas. Matavimo reikšmės per mažos (dideles).	Ar manžetė yra širdies lygyje? Ar manžetė yra tinkamai uždėta? Ar Jūsų ranka nėra įtempta? Gal būt, Jūs kalbėjote arba judinote ranka matavimo metu.	Atsisėskite taisyklingoje pozijoje kraujospūdžio matavimo metu. Tinkamai uždėkite manžetę. Atsipalaiduokite prieš matuodami kraujospūdį. Kraujospūdžio matavimo metu laikykitės tylos ir ramybės.

Pulso dažnio reikšmė per didelė (arba labai maža).	Gal būt, Jūs kalbėjote arba judinote ranka matavimo metu. Matavote kraujospūdį iš karto po fizinio krūvio?	Kraujospūdžio matavimo metu laikykitės tylos ir ramybės. Pakartokite kraujospūdžio matavimą ne ankščiau, kaip po 5 minučių.
Įsaviminis maitinimo išsijungimas.	Suveikia automatinio maitinimo išjungimo sistema.	Tai nėra gedimas. Prietaisas automatiškai išsijungia po 3 minučių po paskutinio kraujospūdžio matavimo.

TECHININĖS CHARAKTERISTIKOS

Matavimo metodas	oscilometrinis su Fuzzy Algorithm technologija
Indikatorius	LCD, trijų eilučių
Slėgio manžetėje indikacijos diapazonas, mm (Hg)	nuo 0 iki 300
Matavimo diapazonas: slėgio manžetėje, mm (Hg) pulso dažnio, 1/min	nuo 40 iki 260 nuo 40 iki 160
Matavimo paklaida: slėgio manžetėje, mm (Hg) pulso dažnio, %	±3 ±5
Elektros maitinimo įtampa, V	6
Elektros maitinimo tipas:	AA maitinimo baterijos (LR6), 4 vnt.
Maksimalus energijos suvartojimas, W	0,09
Atmintis	90 paskutinių kraujospūdžio matavimų + vidutinė trijų paskutinių kraujospūdžio matavimų reikšmė
Eksplotavimo sąlygos: temperatūra, °C santykinis drėgnumas, % Rh	nuo 10 iki 40 85 ir mažiau
Laikymo ir transportavimo sąlygos: temperatūra, °C santykinis drėgnumas, % Rh	nuo minus 20 iki 50 85 ir mažiau
Manžetės dydis	padidinta manžetė suaugusiems (žasto apimtis 25-36 cm)
Gabaritiniai matmenys: Matmuo (elektroninis blokas), mm Svoris (be pakuočės, dėklo ir maitinimo elementų), g	121 x 84 x 64 303
Komplektavimas	elektroninis blokas, manžetė Cuff-LDA (surinkta su vamzdeliais ir trišakiu), surinktas slėgtuvas LD-S035 (su slėgio išleidimo vožtuvu ir atbuliniu vožtuvu), 4 maitinimo elementai, dėklas, naudojimo instrukcija, garantinis talonas, pakuotė
Pagaminimo metai	Pagaminimo metai ir mėnuo nurodyti ant apatinės prietaiso dalies serijos numeryje po "A" simbolio.

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ:

CE 0123 Atitinka Direktyvą 93/42/EEC

☞ Svarbu: Perskaitykite instrukciją

☞ ☞☞☞ Matavimo prietaisų tipo patvirtinimas

☞ Gamintojas

☞ Saugoti nuo drėgmės

☞ II saugumo klasė

☞ BF tipo prietaisas

Gamyba sertifikuota pagal tarptautinį standartą ISO 13485. Prietaisas LD2 atitinka Europos direktyvą MDD 93/42/EEC, tarptautinius standartusN980, EN1041, EN1060-1, EN1060-3, EN10601-1-2, ISO 14971.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantiniai įsipareigojimai nurodyti garantiniame talone, kuris pateikiamas pirkėjui šio prietaiso pardavimo metu. Manžetėi ir oro žamelei suteikiamas 12 mėnesių garantinis terminas nuo pardavimo datos. Garantinę priežiūrą atliekančių organizacijų adresai yra nurodyti skyriuje «GAMINTOJAS IR ĮGALIOTI ATSTOVAI» arba internete adresu www.LittleDoctor.sg.

GAMINTOJAS IR ĮGALIOTI ATSTOVAI

Pagaminta kontroliuojant Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591, Singapore, pašto adresas: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699) ir pagal jos užsakymą. Gamintojas: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

Distributorius Europos Sąjungoje: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Krokova, Lenkija, telefonas: +48 12 2684746, 12 2684747, faksas: +48 12 268 47 53, el. paštas: biuro@littledoctor.pl)

Garantinis talonas

Modelis	Pardavimo data
Serijos numeris	Garantinis laikotarpis
Pirkėjo vardas	
Podpis prodeje / Pardavėjo parašas / Pärdevēja paraksts / Müjia alllkiri / Підпис продавця	Parduodančios įmonės antspaudas (štampos)

Pildo autorizuoto serviso centro atstovas

Data	Žymos apie serviso priežiūrą