



KOMPRESSZOROS INHALÁTOR LD SOROZAT. Használati utasítás.

1. ábra ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

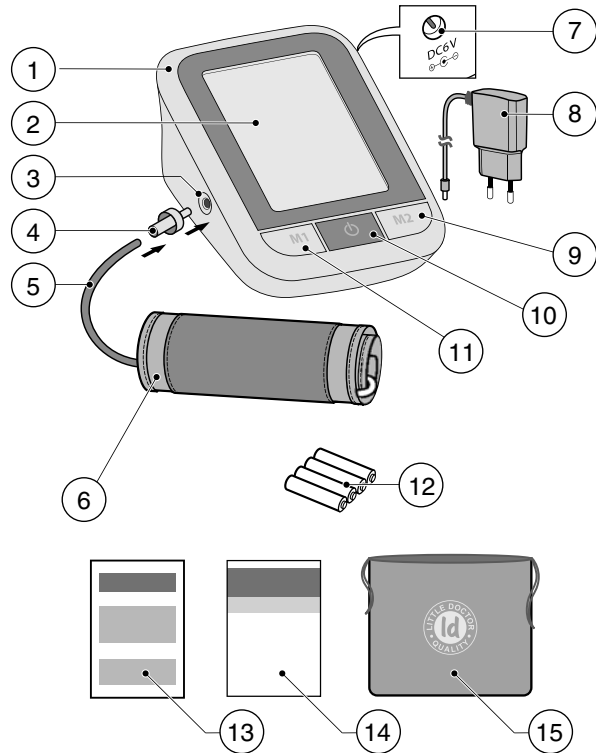


2. ábra AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

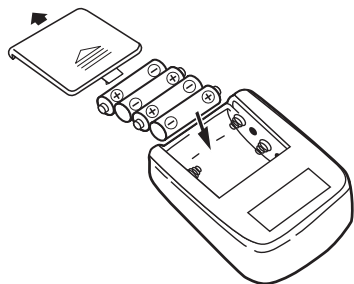


3. ábra

Az adagoló típusától függően, a különböző méretű részecskék aeroszol eloszlása a következő:

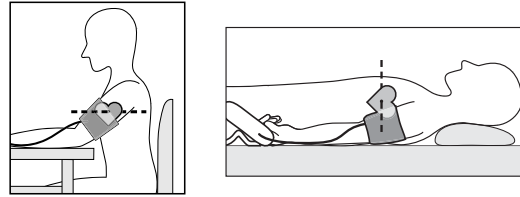


4. ábra

A MANDZSETTA ELŐKÉSZÍTÉSE

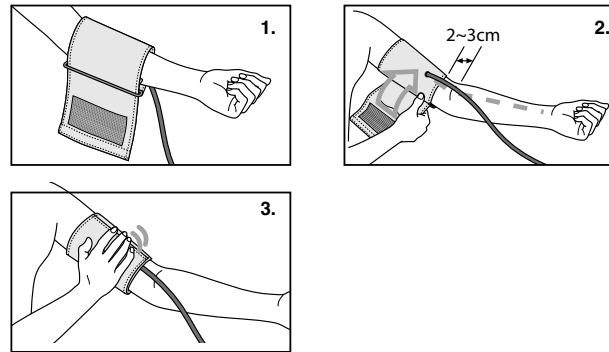


5. ábra

A MÉRÉS MÓDSZERE

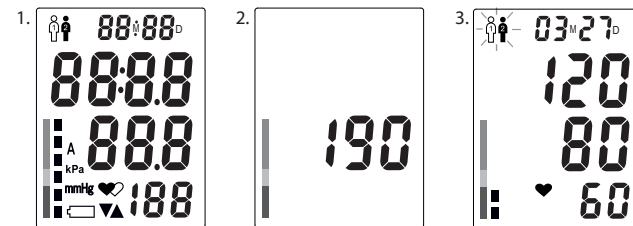

6. ábra

A MÉRÉS MÓDSZERE

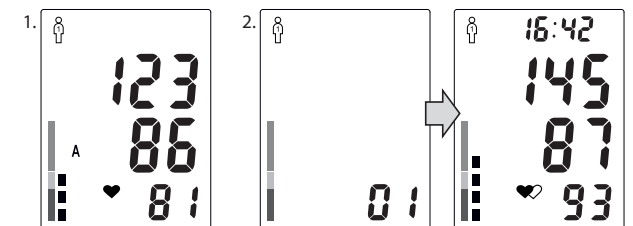

H U

ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE (1. ábra)

- AZ ELEKTRONIKUS BLOKK.
- LCD KIJELZŐ.
- JACK A MANDZSETTA ÖSSZEKÖTÉSÉRE.
- A LEVEGŐTÖMLŐ DUGÓJA.
- A LEVEGŐTÖMLŐ.
- A MANDZSETTA.
- ALJZAT A TÁPEGYSÉG CSATLAKOZTATÁSÁHOZ.
- TÁPEGYSÉG LD-N057 (AZ LD51A ÉS AZ LD51U ESETÉBEN).
- M2 GOMB (2. MEMÓRIA).
- GOMB (START / STOP).
- M1 GOMB (1. MEMÓRIA).
- ELEMEK.
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.
- JÓTÁLLÁSI KÁRTYA.
- TÁSKA.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ez a kézikönyv segítséget nyújt a felhasználónak az automatikus digitális készülék (továbbiakban: készülék) biztonságos és hatékony működtetéséhez, a vérnyomás és az LD pulzusszám mérésére, (LD51, LD51A, LD51U végrehajtása) A készüléket az ebben a kézikönyvben lefektetett szabályok szerint kell használni, és nem szabad felhasználni az itt leírtaktól eltérő célokra. Fontos, hogy olvassa el és értse meg a teljes kézikönyvet, különösen az "Ajánlások a helyes méréshez" fejezetet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Az eszközt úgy tervezték, hogy mérje a szisztolés és diasztolés vérnyomást, és meghatározza a pulzusszámot a 15 évesnél idősebb betegeknél. Az eszköz az instabil artériás nyomás, vagy az ismert magas artériás vérnyomás kezelésére ajánlott, az orvosi megfigyelés kiegészítéseként.

A MŰKÖDÉS ELVE

A készülék oszcillometrikus módszert alkalmaz a vérnyomás és a pulzusszám mérésére. A mandzsettát a felkarra kell helyezni, mely automatikusan felfújódik. A készülék érzékelő eleme érzékeli a mandzsettában lévő nyomás gyenge ingadozását, amelyeket a brachialis artéria terjesztése és összehúzása állítja elő a szív minden egyes lökésére. A nyomási hullamok amplitúdója mérhető, átalakítható higanymilliméterbe és az megjelenik a kijelzőn digitális érték formájában. A készülék memóriája 90 cellát tartalmaz a mérési eredmények tárolására. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék nem adhatja meg ezt a mérési pontosságot, ha azt a kézikönyv "Műszaki adatok" szakaszában meghatározottaktól eltérő hőmérsékleten vagy páratartalomban használja vagy tárolja. Figyelemztetjük a súlyos aritmiában szenvedő személyek vérnyomásának mérésénél történő lehetséges hibákról. Forduljon orvosához, amennyiben gyermek vérnyomását szeretné mérni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A jelen Útmutató kiadásának dátuma az utolsó oldalon látható EXXX/YYMM/NN formában, ahol YY a kiadási év, MM a kiadási hónap.
A készülékek gyártása az ISO 13485 nemzetközi szabvány szerint tanúsított.
LD51, LD51A és LD51U készülék megfelel az MDD 93/42 / EKG számú európai irányelvnek, a nemzetközi szabványoknak, az EN980-nak.
LD-N057 tápegység megfelel az EN 55022 Class A osztályú szabványnak, az áramütés elleni védelmi szint II osztály, BF típus.

JAVASLATOK A HELYES MÉRÉSRE

1. A helyes méréshez tudnia kell, a következőket. A vérnyomásmértést számos tényezőtől függ. Általában nyáron az alacsonyabb és télen magasabb. Az artériás nyomás a légköri nyomás mellett változik, a fizikai terheléstől, az érzelmi ingerlékenységtől, a stressztől és az étrendtől függ. Nagy befolyást tesznek a gyógyszerek, az alkoholtartalmú italok és a dohányzás. Sok esetben még a poliklinikában a nyomás mérésére szolgáló eljárás is növeli az indexeket. Ezért az otthon mért vérnyomás gyakran különbözik a poliklinikában mért nyomásértéktől. Mivel a vérnyomás alacsony hőmérsékleten emelkedik, szobahőmérsékleten (kb. 20 ° C) mérjük. Ha a készüléket alacsony hőmérsékleten tárolták, a használata előtt hagyja azt a szobahőmérsékleten állni legalább 1 óráig, ellenkező esetben a mérési eredmény hibás lehet. Egy napon belül az egészséges emberek javulási különbsége 30-50 mm Hg. szisztolés (felső) érték, és legfeljebb 10 mm Hg. diasztolés (alsó) érték. A vérnyomás különböző tényezőktől függ és minden ember számára egyedi. Ezért ajánlott speciális naplót vezetni a vérnyomásmérésről. CSAK A DIPLOMÁS ORVOS ELEMEZHETI A NAPLÓ ADATAI ALAPJÁN AZ ARTERIÁLIS NYOMÁS VÁLTOZÁSAIT.
2. A szív- és érrendszeri megbetegedéseknél és számos egyéb betegségénél, ahol a vérnyomás ellenőrzése szükséges, végezzen méréseket az orvos által meghatározott időpontokban. NEM SZABAD FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNI, HOGY A DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSÁT ÉS A HIPERTÓNIA BÁRMILYEN KEZELÉSÉT, CSAK DIPLOMÁS ORVOS VÉGEZHETI, A MÉRTEK ADATOK FÜGGVÉNYESÉN. A KEZELÉSRE, A GYÓGYSZEREK SZEDÉSÉRE, VAGY MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉST CSAK A KEZELŐORVOS HOZHATJA MEG.
3. A súlyos vaszkuláris szklerózis, a gyenge impulzus hullám, valamint a súlyos szívritmuszavarok esetén a vérnyomás pontos mérése nehéz lehet. Ezekben az esetekben az ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ KONZULTÁCIÓ SZÜKSÉGES A SZAKORVOSSEL.
4. AZ ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN, AZ ARTERIÁLIS NYOMÁS JELZÉSEINEK JOBB MEGFIGYELHETŐSÉGE ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBIK JAVASLATOK: a vérnyomás mérését szobahőmérsékleten, nyugodt, kényelmes környezetben kell elvégezni. Egy órával a mérés előtt zárja ki az ételmiszerfogyasztást, 1,5-2 órával a mérés előtt a dohányzást, valamint a tonikus italok, alkohol fogyasztását.
5. A vérnyomásmérés pontossága attól függ, hogy a készülék mandzsettája megfelel-e az Ön karmérének. A MANDZSETTA NEM LEHET SEM SZOROS, SEM LAZA.
6. A vérkeringés visszaállítása céljából a mérések ismételhetők 3 percenként. Azonban a súlyos ateroszklerózisban szenvedő személyek a vaszkuláris rugalmasság jelentős csökkenése miatt hosszabb időtartamot igényelnek a mérések (10-15 perc) között. Ez vonatkozik olyan betegekre is, akik hosszú ideje szenvednek a cukorbetegségben. A vérnyomás

pontosabb meghatározásához ajánlott 3 x egymást követő mérésorozatot végrehajtani, és a mérési eredmények átlagértékét használni.

A KÉSZÜLÉK ÁRAMELLÁTÁSA

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE (2. ábra)

1. Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét, és helyezze be a 4 darab AA típusú elemet a rekeszen belüli ábrának megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a polaritásnak megfelelően vannak-e bent az elemek. Ne nyomja meg az elemtartó fedelét túl nagy erővel, az eltávolításakor (1. ábra).
2. Zárja le az elemtartó fedelét.

A mellékelt akkumulátorok csak a készülék rendelkezésre állásának/ működőképességének ellenőrzésére szolgálnak az értékesítés során, élettartamuk alacsonyabb lehet, mint az ajánlott akkumulátoroké.

- Cserélje ki az összes elemet, ha a kijelzőn folyamatosan megjelenik az akkumulátorcserére utaló jel “”, vagy a kijelzőn nincs jel. Az akkumulátorcserre jelzője nem mutatja a merülés mértékét.
- Az elemek cseréjekor egyszerre cserélje ki azokat. Ne használjon használt elemeket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a készülékből.
- A használt elemeket ne hagyja a készülékben.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÁRAMFORRÁSSAL

A gyártó az LD-N057 stabilizált tápegység használatát ajánlja (az LD51A és LD51U készüléknél ez a tápegység a csomaghoz tartozik). A stabilizált tápegység jackdugója a készülék jobb oldalán található. Ha a készüléket áramforrással szeretné használni, dugja be a tápkábelt a készüléke, és dugja be a tápkábelt a konnektorba, nyomja meg a gombot. Amikor a mérés befejeződött, kapcsolja ki a készüléket a  gombbal, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és húzza ki a tápegység dugóját a készülékből. A dátum- és időbeállítás visszaállításának elkerülése érdekében, ha a készüléket áramforrással használja, ne távolítsa el az elemeket.

A DÁTUM ÉS AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. A dátum és az idő kijelzésének aktiválásához tartsa nyomva a  gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig.
2. Ha a dátum és az idő kijelzés be van kapcsolva, akkor a naptár és az óra beállításához tartsa lenyomva az M1 gombot, és nyomja meg a  gombot. Ezután villogni kezd az ÉV. Az M1/M2 gombok segítségével növelheti / csökkentheti az értéket. A következő paraméter kiválasztása a HÓNAP-NAP-ÓRA-PERC sorrendben beállítására a  gomb megnyomásával történik. Az érték növeléséhez / csökkentéséhez használja az M1 / M2 gombokat.
3. Ha nem végez semmilyen műveletet több mint 1 percig a naptár és az óra beállítás üzemmódban, akkor a készülék magától a dátum- és időmegjelenítési módra vált. Ebben az esetben a már elvégzett módosítások lépnek érvénybe.
4. A dátum és az idő kijelzésének kikapcsolásához tartsa nyomva a  gombot több mint 5 másodpercig.

Az elemek cseréje után a dátum és az idő kijelzése mindig ki van kapcsolva. Az óra üzemmód gyári beállítása ki van kapcsolva. A dátum és az idő kijelzés mód kikapcsolásakor az óra és a naptár aktuális értékei visszaállnak, és a mérési eredmények a dátum és az idő nélkül fennmaradnak. Ha az eszköz nem mér, amikor a dátum és az idő kijelzés be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik az aktuális dátum és idő.
--

A HELYES TESTHELYZET A MÉRÉS NÉL (3. ábra)

Úljón az asztalhoz úgy, hogy a vérnyomásmérés során a karja az asztal lapján pihenjen. Győződjön meg arról, hogy a mandzsetta felkaron lévő helyzete közel azonos magasságban van, mint a szív, és az alkar lazán, mozdulatlanul fekszik az asztalon.

2. A hátán fekvé is mérheti a vérnyomást. Nézzen a mennyezetre, nyugodjon meg és ne mozduljon a mérés alatt.Győződjön meg arról, hogy a felkaron a mérési pont a szív vonalában legyen.

A MANDZSETTA ELŐKÉSZÍTÉSE (4. ábra)

Nyomja meg az  gombot.

1. Húzza a mandzsetta szélét kb. 5 cm-re a fémgyűrűhöz, ahogy az az ábrán látható.

2. Helyezze a mandzsettát a bal karjára úgy, hogy a csőve a tenyér felé legyen irányítva. Ha a mérés a bal karon nehéz, akkor a mérést lehet csunálni a jobb karon. Ebben az esetben nem szabad elfelejtetni, hogy a mérések 5-10 Hgmm- rel eltérhetnek, néhány esetben akár többel is.

3. Húzza össze a mandzsettát a kar körül, úgy, hogy a mandzsetta alsó széle 2-3 cm-re legyen a könyöktől.

Az “ARTERY” feliratú címkét a kararteria felett kell elhelyezni.

4. Rögzítse a mandzsettát úgy, hogy jól illeszkedjen a kar körül, de ne szorítsa meg túlságosan. A túl szoros, vagy túl laza mandzsettarögzítés pontatlan méréshez vezethet.

5. A rögzített mandzsettán az “INDEX” címke a “NORMAL (25-36 cm)” területre mutasson. Ez azt jelenti, hogy a mandzsetta megfelelően illeszkedik, és megfelel a felkar kerületének. Ha a címke «» jelzéssel ellátott területet jelez, akkor a mandzsetta kicsi és a mérés túlbecsült lesz. Ha a címke a «» területre mutat, akkor a mandzsetta nagy, és a mérés alábecsült lesz.

6. Ha a kar kifejezetten kúpos alakú, akkor ajánlatos a mandzsettát spirálban felhelyezni, amint az az ábrán látható.

7. Ha feltűri a ruhája ujját, és egyidejűleg a karját elszorítja , megakadályozva a véráramlást, a műszer által mért érték nem feltétlenül felel meg az artériás nyomásnak.

A MÉRÉS MÓDSZERE (5. ábra)

1. Helyezze a levegőtömítő mandzsettáját a mandzsetta csatlakozójátazatba.

Mérés előtt vegyen 3-5 mély lélegzetet és pihenjen. Ne mozogjon, ne beszéljen, és ne mozgassa a kezét a mérés során.

2. Nyomja meg az  gombot.

3. A kijelző röviden megmutatja az összes szimbólumot, két rövid hangjelzés hallható, és a készülék automatikusan felfújja a mandzsettát. Kezdetben az érték 190 mm Hg-ra áll.

4. Miután elérte a 190 mm-t. Hg. art. a mandzsetta nyomása fokozatosan csökken. A kijelzett értékek csökkennek. Az impulzust villogó “” szimbólum jelzi.

MIVEL AZ ARTERIÁLIS NYOMÁS ÉS A PULZUS MÉRÉSE A LEVEGŐELERESZTÉS IDEJÉN TÖRTÉNIK, KÉRJÜK, HOGY A MÉRÉS KÖZBEN NE MOZDULJON, NE MOZGASSA A KARJÁT, NE FÉSZÍTSE A KARJA IZMAIT.

5. A mérés végén hangjelzés hallható, amely után a készülék leereszt minden levegőt a mandzsettából, és a mérési eredmény megjelenik a kijelzőn .

A villogó «» ikon figyelmeztet arra, hogy az M1 vagy M2 gombok megnyomásával válassza ki az 1. vagy 2. memóriát az eredmény mentéséhez. Az eredmény a következő mérés megkezdéséig vagy a készülék kikapcsolásáig menthető.

A kijelzőn villogó “” ikon jelzi a szabálytalan pulzusszámot. Az aritmia jelző megjelenését a test mozgása is okozhatja a mérés során. Ha a “” jelző időszakonként megjelenik, forduljon orvosához.

A nyomás számértékén kívül az eredmény a WHO skálán is megjelenik (16. ábra). A WHO skála a kapott vérnyomás értékeknek a háromszínű osztályozási skálája, az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint. A kijelző bal oldalán található skála lehetővé teszi a kapott számok értékelését az osztályozás alapján: normál vérnyomás, magas vérnyomást vagy ez a hipertónia egyik fokát jelenti.

6. Nyomja meg az  gombot – a készülék kikapcsolódik. A mérés megismételéséhez ismételje meg újra az adott bekezdésben leírt összes lépését. Pontos eredmény elérése érdekében szünetelt kell tartani a mérések között, szükséges vérkeringés helyreállítása. Ezért 3 percen belül ne végezzen újabb mérést.

A mindegyik mérés (nyomás és impulzus) eredménye automatikusan kerül a készülék memóriájába. A MEMÓRIAI ADATOK FENNMARADNAK A KÉSZÜLÉK ELEMEK NÉLKÜL TÁROLÁSÁKOR IS. A MEGMENTETT ADATOK TÖRLÉSE A MEMÓRIAI MEMÓRIÁJÁBÓL LEHETÉSES A “MEMÓRIA FUNKCIÓ” FEJEZETBEN LEÍRT LÉPÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL. Ha az áramellátást nincs kikapcsolva, és a készüléket 3 percig nem használja, az automatikusan kikapcsolódik.

AUTOMATIKUS FELPUMPÁLÁS

Ha az első nyomás mérésekör a mandzsetta szivattyúzása (190 Hgmm) nem elegendő, vagy a kéz elmozdul, a készülék leállítja a mérést, és felpumpálja a mandzsettát a következő magasabb szivattyúszintre. A készüléknek 4 rögzített mandzsetta felpumpálási szintje van: 190, 230, 270, 300 Hgmm . Az automatikus mandzsetta felpumpálás megismétlődik addig, amíg a mérés sikeresen nem fejeződik be. Ez nem számít hibának.

KÉNYSZERÍTETT NYOMÁSLEERESZTÉS A MANDZSETTÁBÓL

Ha a mandzsettában lévő levegő befecskendezése közben vagy a mérés során (lassú nyomáscsökkentés) gyorsan ki kell engedni a nyomást, nyomja meg az  gombot. A készülék gyorsan leeresztí az összes levegőt a mandzsettából és kikapcsolódik.

A MEMÓRIA FUNKCIÓ (6. ábra)

1. Minden mérésnek az eredménye (nyomás és impulzus) automatikusan fennmarad a készülék memóriájában. Ehhez a mérés után, legfeljebb 3 perc alatt ki kell választani az M1 vagy M2 memóriát, hogy megmentsen.

A MÉRÉSEK EREDMÉNYE NEM MARAD FENN, HA HIBAÜZENET VOLT.

2. Legfeljebb 90 mérési eredmény tárolható minden készülék memóriájában és az utolsó 3-nak az átlagos adata. Ha a mérések száma meghaladja a 90-et, akkor a legrégebbi adatokat automatikusan kicseréli a későbbi mérési adatokkal.

3. M1 vagy M2 gomb megnyomásával megtekintheti a készülék memóriájának tartalmát. Az M1 «» (vagy M2 «») gomb első megnyomásakor a képernyőn megjelenik az “A” szimbólummal jelölt M1 (vagy M2) memóriában tárolt utolsó 3 mérés átlaga (17. ábra). Ha ismét megnyomja az M1 (vagy M2) gombot, a kijelölt M1 «» (vagy M2 «») memória és a memóriahely száma jelenik meg a képernyőn, és annak a tartalma 1 másodperc után jelenik meg (18. ábra). Amikor megjelenik a memóriahely tartalma, a mérés dátuma és időpontja váltakozva jelenik meg a kijelző alsó sorában. Az M1 «» (vagy M2 «») gomb minden egyes megnyomása átvált a következő memóriahelyre.

A KÉSZÜLÉK MEMÓRIA TISZTÍTÁSA

Ahhoz, hogy távolítsa el az M1 (vagy M2) memóriából AZ ÖSSZES megmentett mérési eredményeket, nyomja meg az M1 (vagy M2) gombot, és tartsa legalább 3 másodpercig. A kijelzőn megjelennek a “Clr” szimbólumok, és megtörténik a készülék kiválasztott memóriájának tisztítása.

HIBAÜZENETEK

Kijelző	Valószínű oka	Orvosság
	A mandzsetta hibásan van elhelyezve vagy a levegőtömítő csatlakozó nincs teljesen behelyezve. A méréseket nem lehetett elvégezni a kar mozgása miatt vagy a beszélgetés miatt a mérés során.	Ellenőrizze, hogy a mandzsetta megfelelően van-e elhelyezve, és hogy a dugó szorosan van-e elhelyezve, és ismételje meg a mérési eljárást. Ismételje meg a mérést, teljes mértékben a kézikönyv ajánlásait tartva.
	Lemerültek az elemek.	Cserélje ki az összes elemet újjakra.

KARBANTARTÁS, TÁROLÁS, JAVÍTÁS ÉS HASZNOSÍTÁS

1. A készüléket vedeni kell a nedvségtől, napfénytől, rázkódástól és ütéstől. A készülék nem vízálló
2. Ne tárolja vagy ne használja a készüléket fűtőberendezésekhez és a nyílt lánghoz közelében.
3. Ha a készüléket minuszos hőmérsékleten tárolták, a használata előtt hagyja azt legalább 1 óráig szobahőmérsékleten.
4. Ha a készülék hosszú ideig nincs használatban, vegye ki az elemeket. A kifolyó elemek károsodást okozhatnak. AZ

ELEMEKET TARTSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL!

5. Ne szennyezze a készüléket, óvja a portól. A készülék tisztításához használja puha, száraz ruhát.
6. Nem megengedett a készüléknek és összetevőinek vízzel, oldószerekkel, alkohollal, benzinnel érintkezés.
7. Védje a mandzsettát éles tárgytól, ne próbálja kihúzni vagy kicsavarni a mandzsettát.
8. Ne tegye ki a készüléket erős áramütéseknek és ne dobja azt.
9. A készülék nem tartalmazza a beállítás pontosságát szabályozó szerkezet. Ne próbálja önállóan megnyitni az elektronikus egységet. Szükség esetén a javítatást csak speciális intézményekben végezze.
10. A szolgálati idő lejártá után szükséges rendszeresen konzultálni szakemberekkel (speciális javítási szervezetek), hogy ellenőrizzék a készülék műszaki állapotát.
11. Az hasznosításkor tartsa be az Ön területén érvényes szabályokat. A gyártó nem állapította meg a termék hasznosításának speciális szabályait.
12. A mandzsetta reziszens több egészségügyi kezeléshez. A mandzsetta szövetburkolatának belső oldalát (a páciens karjával érintkező) egy 3%úos hidrogén-peroxid-oldattal áztatott pamut törlővel kezeljük. A hosszantartó használat után megengedett a mandzsetta szövetének részleges elszíneződése. Ne mossa és ne vasalja a mandzsettát.

ESETLEGES PROBLÉMÁK

PROBLÉMA	LEHETÉSES OKA	ORVOSSÁG
Az  gomb megnyomása után nincs jelzés a kijelzőn	Lemerült elemek. Az elemek polarítása nem megfelelő. Szennyezettek az akkumulátor érintkezői. A tápegység nincs az aljzatba bedugva.	Cserélje ki az összes elemet. Helyezze be helyesen az elemeket. Törölje meg az érintkezőket egy száraz ruhával. Dugja be a tápegységet az aljzatba.
A nyomás leáll és újraindul.	Automatikus szivattyúzás történik a helyes mérések biztosítása érdekében. Lehet, hogy beszélt vagy mozgatta a karját a mérés során?	Lásd. MÉRÉSI ELJÁRÁS Nyugodjon meg, és ismételje meg a mérést.
A vérnyomás különbözik minden alkalommal. A mérési értékek túl alacsonyak (magasak)	A mandzsetta a szív szintjén van? A mandzsetta megfelelően van elhelyezve? Nem feszült a karja? Lehet, hogy beszélt vagy mozgatta a karját a mérés során?	Úljön le megfelelően a méréshez. Helyezzen el a mandzsettát megfelelően. Lazuljon el a mérés előtt. A mérés során tartson be csendet és nyugalmat.
A pulzusszám érték túl magas (vagy túl alacsony).	Lehet, hogy beszélt vagy mozgatta a karját a mérés során. A méréseket közvetlenül edzés után végezte?	A mérés során tartson be csendet és nyugalmat. Ismételje meg a mérést legalább 5 perc múlva.
Lehetetlen számos mérést végezni.	Rossz minőségű akkumulátorok.	Csak a lugos elemeket használjon az ismert gyártóktól.
Önműködő áramellátás	Automatikusan indul az áramkikapcsolódás.	Ez nem hibajelenség. A készülék automatikusan kikapcsol 3 percel az egység utolsó működése után.

Ha a fenti ajánlások ellenére nem kapja a megfelelő mérések eredményeket, hagyja abba a készülék használatát és lépjen kapcsolatba karbantartó szervezettel (a jóváhagyott szervezetek címe és telefonszáma szerepel a jótállási jegyen). Ne próbálja meg a belső mechanizmusát beállítani.

SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉG

A garanciális kötelezettségek a jótállási jegyben találhatóak, amelyet a vevő a készülék értékesítésével kap. A jótállási szolgáltatást végző szervezetek címét a jótállási jegy tartalmazza.

Készült a Little Doctor International (S) Pte.Ltd. (35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, Singapore 188307, levelezési cím: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699) ellenőrzése alatt és számára.

Gyártó: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

Forgalmazó az Európai Unióban: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl).

Részletes információ a honlapon: www.littledoctor.sg

www.littledoctor.sg

	Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China				
	Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland				