



OBRÁZKY / FIGŪRAS / ATTĒLI / PILDID / КАРТИНЫ

[illegible][illegible]

PÉČE, SKLADOVÁNÍ, OPRAVY A LIKVIDACE

1. Stetoskop je třeba chránit před zvýšenou vlhkostí, přímými slunečními paprsky, úderem.
2. Neskladujte a nepoužívejte stetoskop v blízkosti topných těles a otevřeného ohně.

1. Stetoskopą būtina saugoti nuo padidintos drėgmės, tiesioginių saulės spindulių.
2. Negalima laikyti ir naudotis stetoskopu arti šildančių prietaisų ir atviros ugnies.
3. Saugokite stetoskopą nuo užteršimo.
4. Saugokite stetoskopą nuo sąlyčio su agresyviais skysčiais
5. Esant būtinybei remontas turi būti atliekamas tik specializuotose įmonėse.
6. Norint utilizuoti prietaisą, vadovaukėtis priimtomis Jūsų šalies taisyklėmis. Specialių reikalavimų prietaisų utilizavimui nenumatyta.

KOPŠANA, UZGLABĀŠANA, REMONTS UN UTILIZĀCIJA

1. Šī ierīce ir jāaizsargā pret paaugstinātu mitrumu, tiešiem saules stariem, triecieniem.
2. Stetoskopu neglabājiēt un nelietojiet tiešā sildierīču un atklātas uguns tuvumā.
3. Sargājiēt stetoskopu no netīrumiem.
4. Nav pieļaujama stetoskopa saskare ar agresīviem šķidrumiem.
5. Nepieciešamības gadījumā remontu veiciet tikai specializētās organizācijās.
6. Utilizējot vadieties no pašreiz Jūsu reģionā spēkā esošajiem noteikumiem. Ražotājs nav noteicis speciālus utilizācijas noteikumus.
7. Ierīces ekspluatācijas apstākļi: Apkārtejā gaisa temperatūra no 10°C līdz 40°C; Mitrums ne vairāk kā 85% Rh. Ierīces uzglabāšanas un transportēšanas noteikumi: Apkārtejā gaisa temperatūra no minus 34°C līdz 50°C; Mitrums ne vairāk 85% Rh.
8. Pulksteņa barošanas elementa nomainīšanu (modelim LD SteTime) veiciet speciālās pulksteņu apkalpošanas darbnīcās.

<