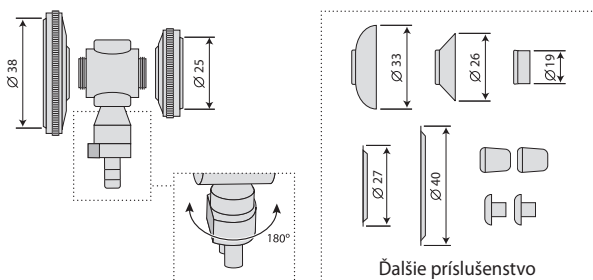


DÔLEŽITÉ!

Pred použitím stetoskopu si pozorne prečítajte tento Návod na použitie.


Model LD Special Multifunkčný stetoskop typ SPRAGUE RAPPAPORT
 dĺžka trubice 56 alebo 72 cm

Popis a vybavenie LD Special:

- Multifunkčný vysoko kvalitný stetoskop (Typ SPRAGUE RAPPAPORT) je určený na auskultáciu srdca, pľúc, krvných ciev, gastrointestinálneho traktu u dospelých pacientov a detí.
- Špeciálne vybavenie poskytuje 4 pracovné kombinácie stetoskopu od obyčajných po novorodenecké.
- Obojstranná kovová hlava (LD-S018) vyrobená podľa špeciálneho dizajnu s veľkými a malými (detskými) membránami - 1 ks. Pracovný priemer veľkej membrány je 38 mm, pracovný priemer malej membrány je 25 mm. Každá membrána je vybavená priehľadnou plastovou membránou. Konštrukčná špecifikácia hlavy vám umožňuje nahradiť ktorúkoľvek z membrán zvonom požadovanej veľkosti. Membrány a zvony sú pripojené k hlave závitom. Prepínanie medzi pracovnými stranami sa vykonáva otočením hlavy okolo tyčového ventilu o 180 stupňov. Plochá strana tyčového ventilu ukazuje na pracovnú stranu hlavy.
- Dve lekárske spojovacie trubice (LD-S029) s dĺžkou 56 alebo 72 cm (uvedené na krabici) - 1 sada.
- Binaurálne kovové trubice s pružinou (LD-S036) a ušnými vložkami - 1 sada.


Dalšie príslušenstvo zahrnuté v súprave:

- Veľký plastový zvon (priemer 33 mm) - 1 ks.
- Malý plastový zvon (priemer 26 mm) - 1 ks.
- Plastový novorodenecký zvon (priemer 19 mm) - 1 ks.
- Veľká membrána LD-S021 (priemer 40 mm) - 1 ks.
- Malá membrána LD-S022 (priemer 27 mm) - 1 ks.
- Plastové ušné vložky - 2 sady.
- Plastová taška na ďalšie príslušenstvo - 1 ks.
- Celkové rozmery balenia, mm: 300 x 130 x 40
- Hmotnosť (vrátane balenia), g: 380

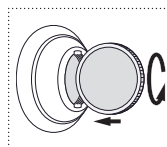
Celkové rozmery v balení, mm: 300 x 130 x 40
Hmotnosť (vrátane balenia), g: 398



Obr. 1

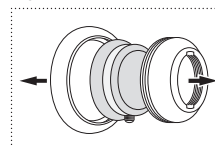

Obr. 2

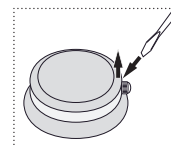

Obr. 3

Výmena batérie

Stetoskopové hodinky LD SteTime používajú batériu LR 626/377, 1,5 V. Výmena batérie je potrebná v priemere raz ročne.

Postup výmeny batérie:

- Na hlave stetoskopu odskrutkujte trysku s hodinami.
 - Pomocou mince odskrutkujte zadnú časť trysky (obr. 1).
 - Vyberte hodinky (obr. 2).
 - Na vypálenie a odstránenie krytu hodiniek použite tenký skrutkovač (obr. 3).
 - Vymeňte batériu (Typ LR626/377, 1,5 v).
 - Zostavte v opačnom poradí.
- Výmenu batérie hodiniek sa odporúča vykonať v špecializovaných hodinárskych dielňach. Záruka sa nevzťahuje na batériu.

Starostlivosť, skladovanie, oprava a likvidácia

- Stetoskop musí byť chránený pred vysokou vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a nárazmi.
- Stetoskop neskladujte ani nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti ohrievačov a otvoreného ohňa.
- Chrňte stetoskop pred znečistením.
- Kontakt stetoskopu s agresívnymi roztokmi nie je povolený.
- V prípade potreby vykonajte opravy iba v špecializovaných organizáciách. Adresy organizácií poskytujúcich záručné služby sú uvedené v záručnom liste.
- Pri likvidácii postupujte podľa platných predpisov vo Vašom regióne. Výrobca nestanovil žiadne osobitné podmienky na likvidáciu.
- Vymeňte batériu hodiniek (pre LD SteTime) v špecializovaných hodinárskych dielňach.
- Rok a mesiac výroby sú uvedené na obale. Životnosť batérie (pre LD SteTime) je 1 rok.

Záručné povinnosti

- Tento prístroj má záručnú dobu 2 roky od dátumu predaja. Záručná doba na manžetu a kompresor je 12 mesiacov od dátumu predaja.
- Záručné povinnosti sa vydávajú so záručným listom pri predaji prístroja kupujúcemu.
- Adresy organizácií poskytujúcich záručný servis sú uvedené v časti "Výrobca a autorizovaní zástupcovia" alebo na webovej stránke www.littledoctor.sg.

DEKODOVACIE ZNAKY

CE Súlad so Smernicou Európskej Únie

Dôležité: Prečítajte si Návod na použitie

EC REP Zastupiteľská kancelária v Európskej Únii

Dátum výroby: YYYY - rok, MM - mesiac (uvedený na obale)

Výrobca

Chráňte pred vlhkosťou

Dátum výroby: YYYY - rok, MM - mesiac (uvedený na obale) Chráňte pred vlhkosťou. Dátum vydania tohto Návodu na použitie je uvedený na poslednej stránke vo formulári EXXX/YYMM/NN, kde YY je rok, MM je mesiac a NN je číslo vydania.


VÝROBCA A AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCOVIA

Výroba je certifikovaná podľa medzinárodnej normy ISO 13485.

Vyrába sa pod dohľadom a pre Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199591, Singapore.

Výrobca: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Oficiálny zástupca v EÚ: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl). Podrobnejšie informácie na webovej stránke www.littledoctor.sg

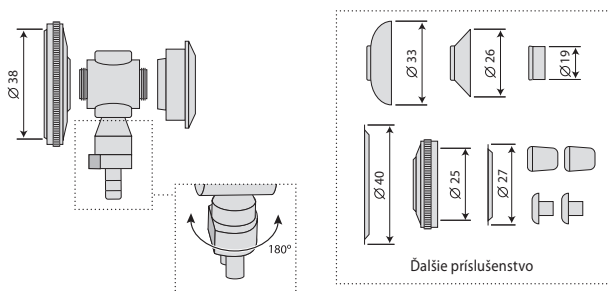Model LD SteTime Multifunkčný stetoskop typ SPRAGUE RAPPAPORT

Popis a kompletná sada LD SteTime:

- Multifunkčný vysokokvalitný stetoskop (Typ SPRAGUE RAPPAPORT) s kremennými hodinami zabudovanými do hlavy je určený na auskultáciu srdca, pľúc, krvných ciev, gastrointestinálneho traktu u dospelých pacientov a detí.
- Špeciálne vybavenie poskytuje 4 pracovné kombinácie stetoskopu od obyčajných po novorodenecké.
- Špeciálne vyrobená obojstranná kovová hlava (LD-S041) s veľkou membránou a tryskou s kremennými hodinami - 1 ks. Pracovný priemer membrány je 38 mm. Membrána je vybavená priehľadnou plastovou membránou. Konštrukčná špecifikácia hlavy Vám umožňuje nahradiť membránu aj hodiny akoukoľvek tryskou zo sady doplnkového príslušenstva. Membrány, hodiny a zvony sú pripojené k hlave závitom. Prepínanie medzi pracovnými stranami sa vykonáva otočením hlavy okolo tyčového ventilu o 180 stupňov. Plochá strana tyčového ventilu ukazuje na pracovnú stranu hlavy.
- Dve lekárske spojovacie trubice s dĺžkou 56 cm - 1 sada.
- Binaurálne kovové trubice s pružinou a ušnými vložkami - 1 sada.

Dalšie príslušenstvo zahrnuté v súprave:

- Veľký plastový zvon (priemer 33 mm) - 1 ks.
- Malý plastový zvon (priemer 26 mm) - 1 ks.
- Plastový novorodenecký zvon (priemer 19 mm) - 1 ks.
- Veľká membrána (priemer 40 mm) - 1 ks.
- Malá membrána (pracovný priemer 25 mm) - 1 ks.
- Malá membrána (priemer 27 mm) - 1 ks.
- Plastové ušné vložky - 2 sady.
- Plastová taška na ďalšie príslušenstvo - 1 ks.

Little Doctor

ZÁRUČNÝ LIST

MODEL	SÉRIOVÉ ČÍSLO	ZÁRUČNÁ DOBA
MENO KUPUJÚCEHO	PODPIS KUPUJÚCEHO	
DÁTUM PREDAJA	PODPIS PREDÁVAJÚCEHO	
VYPLNENÉ ZÁSTUPCOM AUTORIZOVANÉHO SERVISNÉHO STREDISKA		PEČAŤ (PEČIATKA) OBCHODNEJ ORGANIZÁCIE